



ІНВАПОЛ
З ТУРБОТОЮ ПРО БЛИЗЬКИХ

**БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ
КРІСЛО КОЛІСНЕ
(для дітей)
МОДЕЛЬ UK8001**



**Паспорт
(Інструкція з використання)**

Зміст

с.

Призначення.....	2
Загальні рекомендації.....	2
Комплект поставки.....	2
Основні технічні дані та характеристики.....	2
Опис.....	3
Установка.....	3
Установка подушки на спинку сидіння.....	3
Установка подушки для сидіння.....	4
Установка підставки для ніг.....	4
Установка захисної секції.....	5
Обслуговування після продажу.....	5
Технічне обслуговування.....	6
Заходи безпеки при користуванні кріслом.....	7
Правила зберігання, транспортування.....	8
Гарантійні зобов'язання.....	8
Інформація про виробника.....	9
Пояснення символів на маркуванні	9
СВІДОЦТВО ВИРОБУ.....	10
ГАРАНТІЙНІ ТАЛОНИ.....	11

ПРИЗНАЧЕННЯ

Багатофункціональне крісло колісне (для дітей) УК 8001 (далі крісло колісне) призначене для пересування дітей з інвалідністю та дітей з ДЦП в умовах приміщень і на майданчиках з твердим покриттям. Пресування здійснюється за допомогою супроводжуючої особи. Для того, щоб виключити ймовірність травмування користувача або пошкодження обладнання не потрібно нехтувати рекомендаціями і загальними вимогами безпеки.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При отриманні детально огляньте крісло колісне і перевірте його комплектність згідно з розділом “Комплект поставки”.

Перш ніж почати експлуатацію крісла колісного ознайомтесь з інструкцією користувача. Дотримання вимог і рекомендацій інструкції допоможе Вам якнайшвидше опанувати користування кріслом колісним та продовжить термін його служби.

Крісло колісне призначене для його використання як в приміщенні, так і на вулиці. Крісло не призначене для пересування сходами. Для переміщення з одного поверху на інший користуйтеся ліфтом.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Крісло колісне – 1 шт;
- паспорт з гарантійними талонами – 1 шт;
- упаковка – 1 шт.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

<i>Технічні характеристики крісла колісного</i>	<i>Значення розмірів і параметрів</i>	<i>Значення розмірів і параметрів</i>
Модель УК8001	розмір 1	розмір 2
Габаритна довжина, мм	830	830
Габаритна ширина, мм	640	640
Висота, мм	1160	1160
Ширина сидіння, мм	280-320	320-400
Глибина сидіння, мм	300	300
Висота сидіння над підлогою, мм	515	515
Діаметр великих коліс, мм, тип коліс	120 PU	120 PU
Діаметр малих коліс, мм, тип коліс	80 PU	80 PU
Допустиме навантаження, кг	60	60
Маса, кг	19,6	19,6
<i>Примітка 1. Граничні відхилення розмірів крісла та їх елементів, що зазначені в таблиці 1, можуть складати $\pm 3\%$</i>		

ОПИС



1	Ручка	6	Передні колеса
2	Накриття від сонця та дощу	7	Сумка для зберігання речей
3	Спинка	8	Задні колеса
4	Зона для сидіння	9	Гальма
5	Підставка для ніг		

Діапазон регулювання ширини сидіння

Стандартний розмір	280-320мм
Великий розмір	320-400мм

УСТАНОВКА

УСТАНОВКА ПОДУШКИ НА СПИНКУ СИДІННЯ



1. Витягніть металеву пластину з подушки спинки сидіння;
2. Зніміть м'яку частину подушки
3. Знайдіть кнопку кріплення на задній панелі та вставте її у відповідний отвір на металевій пластині
4. Коли застібка встановлена, прикріпіть підкладку до металевій пластині;

5. Завершіть устаовку подушки спинки сидіння.

УСТАНОВКА ПОДУШКИ ДЛЯ СИДІННЯ



1



2



3



4



5

1. Знайдіть кріпильні отвори в задній подушці та відповідні кріпильні затискачі;
2. Вставте кнопки кріплення через монтажні отвори та через монтажні отвори в металевій пластині сидіння;
3. Прикріпіть ліву та праву кнопки кріплення;
4. Прикріпіть кришку сидіння та закріпіть її;
5. Прикріпіть кріпильні реміні.

УСТАНОВКА ПІДСТАВКИ ДЛЯ НІГ



1



2





3



4

1. Вийміть підставку для ніг;
2. Відрегулюйте висоту педалі відповідно до фактичних вимог, вирівнявши регулювальні отвори;
3. Прикріпіть пластикові деталі до штифтів та зафіксуйте їх;
4. Прикріпіть лямку для ніг.

УСТАНОВКА ЗАХИСНОЇ СЕКЦІЇ



1



2



3

1. Вставте металеву трубку в отвір;
2. Поверніть на 90 ° і зафіксуйте;
3. Завершіть установку.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІСЛЯ ПРОДАЖУ

Якщо проблеми з виробом виникли не з боку користувача протягом тижня після покупки, наша компанія несе відповідальність за повернення, заміну та ремонт; якщо через рік після продажу, виникнуть проблеми з виробом, користувачі можуть звернутись до нашого відділу післяпродажного обслуговування або до дилерських магазинів із рахунком-фактурою та гарантійним талоном, і ми надамо деталі для інвалідного візка та стягнемо розумну плату, щоб запропонувати вам задовільний сервіс.

Наступні випадки не належать до сфери безкоштовного обслуговування:

- протікання, пошкодження та іржа на поверхні.
- помилки, що виникають через неналежне використання, обслуговування та зберігання.
- помилки, що виникають через збирання та розбирання для ремонту користувачами.
- пошкодження, спричинені нещасними випадками або пошкодженнями, спричиненими людськими руками.

ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед експлуатацією крісла необхідно ознайомитися з вказівками заходів безпеки.

Перед початком експлуатації крісла розконсервуйте його. Протріть металеві поверхні деталей та вузлів ганчірковими тампонами, змоченими в теплій мильній воді і витріть після цього насухо.

Забороняється:

- перевищувати допустиме навантаження;
- різко гальмувати під час спускання; це може призвести до перекидання крісла вперед;
- користуватися кріслом з несправними гальмами.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

При експлуатації крісло потребує певного технічного догляду.

При необхідності сидіння, спинку і підлокітники слід протирати (дезінфікувати) вологою ганчіркою, змоченою в 0,5 - 1,0% розчині хлораміну. Не сідайте в крісло, якщо його сидіння мокре.

Не користуйтеся при високих температурах або при високій вологості.

Необхідно пам'ятати, що поверхні металевих деталей крісла мають декоративно-захисне покриття і тому вимагають дбайливого ставлення. Слід обережати поверхні металевих деталей від ударів твердими і гострими предметами. Після прогулянки на вулиці потрібно усунути з поверхні сліди бруду та протерти крісло насухо.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ КОРИСТУВАННІ КРІСЛОМ

Для забезпечення коректної і стабільної роботи крісла дотримуйтеся наступних правил:

- перед початком експлуатації уважно прочитайте інструкцію;
- при посадці в крісло і висадці з нього колеса повинні бути загальмованими;
- по можливості об'їжджайте калюжі (особливо глибше 6 см);
- перевіряйте працездатність гальм;
- перевіряйте кріплення всіх гвинтів і гайок.

Забороняється:

- експлуатувати крісло з несправними гальмами;
- ставати на опори для стоп крісла;
- сидячи в кріслі діставати будь-які предмети, нахилившись вперед або назад — це може призвести до перекидання крісла;
- використовувати крісло на слизьких дорогах, по піску;
- пересуватися в кріслі проїжджою частиною доріг при наявності тротуарів;
- пересуватися в кріслі поверхнею з ухилом більше 8 градусів;

пересуватися в кріслі під час ожеледиці, у вечірній і нічний час, в умовах поганої видимості, при поганому самопочутті.

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

При тривалому зберіганні зберігайте крісло в сухому місці, уникайте потрапляння прямих сонячних променів.

Умови зберігання крісел в пакуванні в частині дії кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання відповідно до групи 3 згідно з ГОСТ 15150. Згідно групи 3 коливання температури зберігання від 50 °С до мінус 50 °С. Дозволено нижнє значення температури приймати мінус 10 °С, якщо виріб не транспортується або зберігається на території з помірним та холодним кліматом у зимовий час.

Не дозволено зберігати крісла колісні в одному приміщенні з хімічно-активними речовинами та за наявності пилу.

Навантажувати і розвантажувати крісла потрібно з дотриманням вимог маніпуляційних знаків транспортної тари.

Граничний термін зберігання без переконсервації - не більше 12 місяців.

Транспортувати крісло потрібно критим транспортом будь-якого виду відповідно до правил перевезення вантажів, що чинні на даному виді транспорту та згідно з вимогами ГОСТ 15150.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виробник гарантує відповідність крісла всім вимогам у разі дотримання споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатування зазначеним у цій інструкції.

Гарантійний строк експлуатації крісла - 12 місяців з дня продажу або отримання через роздрібну торговельну мережу.

Гарантійний строк зберігання – 24 місяці з дати випуску. Термін служби виробу – 3 роки. Виробник гарантує використання виробу за призначенням впродовж терміну служби виробу.

Впродовж гарантійного строку користувач має право на безкоштовний ремонт за умови пред'явлення гарантійного талону до сервісного центру.

Без пред'явлення гарантійного талону на виріб або за відсутності на відривних талонах штампу магазину або органу, що видав виріб, та дати продажу/отримання, претензії до якості виробу не приймаються, та гарантійний ремонт не здійснюється.

Гарантійні зобов'язання не діють у випадку:

- недотриманні правил експлуатації;
- використанні неоригінальних компонентів;
- неналежному зберіганні;
- пошкодженні, викликаним механічним впливом;
- пошкодження, викликані самостійним втручанням.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник:

JIANGSU INTCO MEDICAL PRODUCTS CO., LTD

No. 77, Yandunshan Road, Dagang Zhenjiang, провінція Jiangsu, 212132, Китай. Tel: +86 511 83174088;

Fax: +86 511 83174188; Website: www.intcowheelchair.com

Офіційний представник в Україні: ТОВ «Інвапол»,
03168, м. Київ, вул. Академіка Кримського, буд.27
тел. (67) 547- 22 - 00.

ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ НА МАРКУВАННІ



знак відповідності технічним регламентам



символ «Виробник»



символ «Дата випуску»



символ «Використати до»



символ «Ознайомлення з інструкцією для застосування»



символ «Увага! Дивись інструкцію із застосування»



символ «Код партії»

SN

символ "Серійний номер"

СВІДОЦТВО ВИРОБУ

Крісло колісне визнане придатним до експлуатації виробником і відповідає нормам ЕС:
Директиви 93/42/ЕЕС (Директива 2007/47/ЕС) медичні пристрої. Знак СЕ.
Зареєстровано в Реєстрі сертифікованої продукції та відповідає вимогам ДСТУ 4879:2007
«КРІСЛА КОЛІСНІ»

Модель YK8001

Дата випуску _____

Серійний номер _____

Заповнює торговельне підприємство/орган, що видав виріб

Дата продажу/отримання _____
(число, місяць, рік)

Підпис особи, що видала виріб _____
(підпис або штамп)

Штамп/печатка
Магазину/установи
М.П.

ГАРАНТІЙНІ ТАЛОНИ

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН № 1

на гарантійний ремонт крісла колісного

Модель YK8001

Штамп установи,
що видала крісло колісне.
М.П.

Без відмітки установи про видачу крісла гарантійний ремонт не здійснюється.

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН № 2

на гарантійний ремонт крісла колісного

Модель YK8001

Штамп установи,
що видала крісло колісне.
М.П.

Без відмітки установи про видачу крісла гарантійний ремонт не здійснюється.